

CRIOVAGIN®

Specjalistyczny wyrób medyczny w postaci krioterapeutycznego sztyftu dopochwowego. Stosowany po zabiegu nacięcia lub po pęknięciu krocza podczas porodu. W działaniu wykorzystuje krioterapię miejscową. Ogranicza poziom odczuwanego bólu i zmniejsza obrzęki podczas procesu gojenia się krocza.

Skład: Sztyft krioterapeutyczny, wykonany z wysokiej jakości antyalergicznego tworzywa sztucznego.

Wskazania: Wyrób medyczny, przyspieszający gojenie rany po nacięciu lub pęknięciu krocza podczas porodu. Hamuje odczucie bólu i obkurcza obrzęk towarzyszący procesowi gojenia.

Przeciwwskazania i interakcje: brak. Tworzywo sztuczne, z którego wykonano sztyft nie powoduje żadnych negatywnej reakcji organizmu. Uzyskane w domowych warunkach zimno nie jest niebezpieczne dla organizmu. Sztyft dochodzi do temperatury ciała w ciągu kilku minut, nie powodując żadnych skutków ubocznych w postaci odmrożeń lub innych uszkodzeń śluzówki.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Działania uboczne: bezpośrednio po aplikacji może wystąpić nieznaczny dyskomfort, związany z aplikacją zamrożonego sztyftu. Odczucie mija po kilkunastu sekundach.

Sposób stosowania:

Przed zastosowaniem sztyft należy zamrozić w zamrażalniku lodówki w temp. -15 do -25 stopni Celsjusza. Czas zamrażania min. 2 godziny. Stosować dopochwowo, niezwłocznie po wyciągnięciu z zamrażalnika. Sztyft aplikować leżąc na plecach. Głębokość aplikacji wyznacza ogranicznik w postaci grzybka. Czas aplikacji powinien wynosić ok. 8 minut.

Po tym czasie sztyft wyciągnąć, umyć pod bieżącą ciepłą wodą z mydłem. Osuszyć, przetrzeć środkiem dezynfekującym i ponownie umieścić w zamrażalniku, w załączonym pojemniku. Nie gotować!

Sztyft należy stosować 1-2 razy w ciągu dnia, przez kolejnych 10 dni. Zasada działania sztyftu, opiera się na uznanej przez medycynę i stosowanej od wielu lat krioterapii miejscowej. Kuracja jest w 100 % naturalna. Uzyskana w zamrażalniku lodówki lub zamrażarce wolnostojącej niska temperatura jest bezpieczna dla organizmu i nie powoduje jakichkolwiek powikłań. Bezpośrednia emisja zimna na ranę po cięciu lub pęknięciu krocza, powoduje ustąpienie obrzęków i hamuje odczuwanie bólu.

UWAGA!!! Ze względów higienicznych, należy przechowywać sztyft w załączonym pojemniku. Przed i po aplikacji, należy umyć ręce.

Wyrób medyczny



Wytwórca:

PHU Marsylka

Ul. Kręta 11

05-800 Pruszków

Polska

www.KomfortKobiety.pl

Data opracowania ulotki : 10.03.2025